

VEILIGHEIDSINFORMATIE

SYMBOLLEN EN BETEKENISSEN OP LABELS THELMA



CE-markering (Conformité Européenne)



Alleen voor gebruik binnenshuis



Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag niet bij het gewone afval worden weg-gegooid. Thelma dient u terug te geven aan uw zorgverlener



Gelijkstroom 12,0V 2,0A 24,0W



Fabrikant



Serienummer



Batchnummer



Polariteit van gelijkstroom stekker

Mobiele communicatie-informatie

Dit product is speciaal ontworpen om radiosignalen uit te zenden en te ontvangen, zodat het goed kan functioneren. Binnen de ondersteunde mobiele frequentiebanden varieert de bandbreedte voor zowel zenden als ontvangen van 1,4 tot 20 MHz. Er wordt gebruikgemaakt van QPSK-, 16QAM- en 64QAM-modulatie, met een maximaal uitgestraald vermogen (ERP) van 200 mW (0,2 watt).

Ondersteunde mobiele frequentiebanden in de EU:

	VERZENDEN	ONTVANGEN
B1	1920-1980 MHz	2110-2170 MHz
B3	1710-1785 MHz	1805-1880 MHz
B8	880-915 MHz	925-960 MHz
B20	832-862 MHz	791-821 MHz
B28	703-748 MHz	758-803 MHz

WAARSCHUWINGEN

1. Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
2. Gebruik uitsluitend de meegeleverde voeding; andere voedingen kunnen het product beschadigen.
3. Zorg ervoor dat de stroomkabels goed vastzitten.
4. Controleer de kabels en adapter voordat u het apparaat inschakelt. Bij beschadiging dient de voeding vervangen te worden door de fabrikant.
5. Plaats de dispenser op een vlakke en stabiele ondergrond.
6. Niet plaatsen op een oppervlak boven hoofdhoogte of op een oneffen of hellend oppervlak.
7. Het apparaat moet buiten het bereik van baby's en jonge kinderen worden geplaatst.
8. Ga voorzichtig om met de pen, want een gebroken voorwerp is scherp; buiten bereik van kinderen houden.
9. Steek uw vingers niet in de dispenser.
10. Niet demonteren; buiten bereik van kinderen houden. Mogelijk niet geschikt voor patiënten met gevorderde cognitieve achteruitgang.
11. Wees voorzichtig als u het apparaat naar een nieuwe locatie verplaatst en vraag hulp als het te zwaar is.
12. Plaats het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparatuur, omdat dit de werking kan beïnvloeden.
13. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats, niet in direct zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen (zoals radiatoren). Volg de gebruikelijke bewaarschriften van uw medicatie.
14. Houd het apparaat uit de buurt van hitte- en vlambronnen, ontvlambare of brandbare vloeistoffen of gasen en explosieve atmosferen.
15. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat terechtkomt. Er mogen geen schurende schoonmaakmiddelen worden gebruikt.
16. Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde gebruik dat in deze handleiding wordt beschreven.
17. Reparaties en aanpassingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant geautoriseerde personen en fabrikant zelf.
18. Haal het apparaat niet uit elkaar. In geval van een defect mag het product uitsluitend worden gerepareerd door de fabrikant geautoriseerde personen en fabrikant zelf.

Onze handleiding is te vinden op www.tsc-cc.com. Neem contact op met support@tsc-cc.com indien u een geprinte handleiding wilt ontvangen.